

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.TL.02	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Laboratuarda kullanılan gizli kan testinin, günlük çalışmasının kurallarla düzenlenmesi.

2. KAPSAM

Laboratuvar teknisyenleri

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1 Test kartı üzerine hasta bilgileri yazılır veya barkod yapıştırılır.
- 6.2 Ön taraftaki kapağı açılır.
- 6.3 Tahta çubuğu kullanarak örnekten bir miktar alınır.1. kutucuğa çok ince bir tabaka halinde sürülür.
- 6.4 Örneğin; farklı yerin bir miktar daha alınıp 2. kutucuğa çok ince bir tabaka halinde tekrar sürülür.
- 6.5 Kuruması beklenir ve kapağı kapatılır.
- 6.6 Arka taraftaki çentikli yerden kapak açılır. Örnek sürülen yerin tam arka tarafındaki yerlere 2'şer damla Hema-Screen Developer solüsyonu damlatılır.
- 6.7 30 sn. - 2 dk. beklenir. Değerlendirme yapılır.
- 6.8 Hema- Screen damlatılan bölgede herhangi bir değişme olmaz ise sonuç negatif, şayet mavi renge dönüşüyorsa sonuç pozitif olur.
- 6.9 Sonuçlar LIS bilgisayarına yazılıp teknik onay verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM