

	BİLİRUBİNMETRE KULLANIM TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.TL.07	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Laboratuvarda kullanılan Bebek Bilirubini cihazının bakım, kalite kontrol ve günlük çalışmasının kurallarla düzenlenmesi.

2. KAPSAM

Laboratuvar teknisyenleri

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Laboratuvar teknisyenleri

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Cihaz, arka kısmında bulunan düğmeden açılır.

6.2 Cihazın üst kısmında bulunan optik okuyucuya içine distile su çekilmiş hematokrit tüpü yerleştirilir. Chek Butonu çekili tutularak ekran göstergesi 10.1 mg/dL olacak şekilde Scala düğmesi ile ayarlanır.

6.3 Chek Butonu bırakıldıktan sonra bir kez O-ADJ tuşuna basılarak ekran değerinin 0 mg/dL olması sağlanır.

6.4 Ayar işlemleri tamamlandıktan sonra kan alınmış Na Heparinli hematokrit tüpleri hematokrit santrifüjünde 5 dakika santrifüj edilir

6.5 Hematokrit tüpleri sadece serum kısmı görünecek şekilde optik okuyucuya yerleştirilir.

6.6 Ekrandan hastaya ait bilirubin değeri alındıktan sonra hematokrit tüpü optik okuyucudan alınır. Cihaz arka tarafındaki düğmeden kapatılır.

6.7 Çıkan Bilirubin konsantrasyonu manuel LIS bilgisayarına girilerek teknik onay yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM