

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.TL.16	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Rotavirüs Antijen kaset testi ve edenovirüs Antijen kaset testi, gaitada kalitatif tanı aracı olarak kullanmak.

2. KAPSAM

Laboratuvar

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Laboratuvar teknikerleri

6. FALİYET AKIŞI

- Teste başlamadan önce kaset test poşetinden çıkarılır ve düz bir zeminde koyulur.
- Gaita örneğinden numune toplama şişesinin çubuğuyla bir miktar alınacak şişenin ağzı kapatılır ve iyice çalkalanır.
- Şişenin üstünde yer alan plastik kapak dikkatlice kırılır.
- 3-4 damla şişedeki numune çözeltisinden kaset testteki numune damlatma deliğine damlatılır.
- Test sonucu için 5-10 dakika beklenir.15 dakikadan sonra dikkate alınmaz .

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Kaset üzerinde bulunan sonuç penceresinde sadece "C" harfi üzerinde yer alan kısmındaki tek çizgi negatif sonucu gösterir.
- Hem "C" hem "T" harfleri üzerindeki çizgiler pozitif sonucu gösterir.
- Çizgi yoksa sonuç geçersizdir.Yeni bir test ile işlem tekrarlanır.
- Sonuçlar LIS bilgisayarına yazılıp teknik onay verilir.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM