

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.TL.18	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 2

## 1. AMAÇ:

Streptococcus Antijen kaset testi, bademciklerde kalitatif tanı aracı olarak kullanmak

## 2. KAPSAM

Laboratuvar ve Servisler

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Laboratuvar ve servis çalışanları

## 6. FALİYET AKIŞI

### 6.1 ÖRNEK ALMA İŞLEMLERİ

**6.1.1** Steril bir swap yardımıyla hastanın diline, dişine, damağına, değdirmeden küçük dil bölgesindeki bademciklere değdirilerek sürüntü alınır.

**6.1.2** Hastanın barkodu olan steril çalışma tüpüne 4 damla A reaktifinden, 4 damla B reaktifinden damlatılır.

**6.1.3** Swapın pamuklu kısmıyla alınan örnek bekletilmeden çalışma tüpüne konur.

**6.1.4** Çubuk 5-10 kez çevrilerek pamuktaki örneğin tüpteki reaktifi geçmesi sağlanır.

**6.1.5** Daha sonra tüpdeki örnek; kaset testin numune kuyucuğına 3 damla damlatılır.

**6.1.6** Sonuç 5 dakika sonra okunur.10 dakikadan sonraki sonuçlar dikkate alınmaz.

**6.1.7** Sonuç LIS bilgisayarına yazılıp teknik onay verilir.

## 7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM



<b>DOKÜMAN KODU</b>	<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REVİZYON NO</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	<b>SAYFA /NO</b>
BL.TL.18	01.01.2019	0	-	Sayfa 2 / 2