

DEFİBRİLATÖR CİHAZININ KULLANIM TALİMATI

| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA /NO |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| MC.TL.01 | 01.01.2019 | 0 | - | Sayfa 1 / 1 |

1. AMAÇ

Hastanemizde defibrilatör cihazının düzgün, etkin ve pratik bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM

Sağlık personelinin kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Sağlık personelleri

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Hasta sırt üstü yatırılır.

6.2 Hasta EKG kablolarının bağlama yerlerine jel sürülür.

6.3 Cihazın açma kapama düğmesi açık konuma getirilir.

6.4 Cihaz istenen joule değerine getirilir.

6.5 Kaşıklara jel sürülür ve şarj olana kadar beklenir.

6.6 Kaşıklar hastanın uygun yerleri hariç temas ettirilmez.

6.7 Kaşıkların üzerindeki düğmelere aynı anda basılır ve uygulama yapılır.

6.8 Uygulama bitiminde cihaz kapatılır, uygun dezenfektan maddelerle temizlenir.

6.9 Günlük şarj olup olmadığı cihaz açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.

6.10 Şarj bitince güç kablosu toprak hatlı prize takılır, şarj dolu konuma gelince güç kablosu prizden çekilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU | KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ | ONAYLAYAN BAŞHEKİM |
|--|--|-------------------------------|