



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.02	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

EKG cihazlarının verimli kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM

Sağlık personelinin kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Sağlık Personelleri

6. FAALİYET AKIŞI

PLUS MED-Pm ECG-300G Marka EKG Cihazı

6.1 Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 v topraklı) takılır.

6.2 Cihaz **ON/OFF** düğmesine 2 saniye basılı tutularak açılır

6.3 Hasta EKG çekimi için hazırlanır. Üzerinde metal varsa (bileklik vs) çıkartılır. Hasta sırtüstü sedyeye yatırılır. Hastanın göğsü açılır, çorapları çıkartılır.

6.4 EKG çekiminin kaliteli olması için gerekirse hastanın göğüs traşi yapılır.

6.5 Elektrotların yerleştirileceği yerlere alkol ya da EKG jeli uygulanır, elektrotlar yerleştirilir.

6.6 EKG çekimine başlanmadan önce hastaya rahat nefes almasını ve hareket etmemesi söylenir.

6.7 Çekim yapmak için EKG cihazının üstündeki Print düğmesine basılır ve EKG çekme işlemine başlar.

6.8 Çekim bittikten sonra hastadan elektrotlar çıkarılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM