

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.05	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

## 1. AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak.

## 2. KAPSAM

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Doktor, hemşire, ebe hemşire, sağlık memurları tarafından kullanılır.

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1** Kartuş paketinden çıkartılır.

**6.2** Kartuşun alt kısmındaki mavi şeffaf bant kartuşu yerleştir uyarısı görülmeden bant kartuştan ayrılmaz.

**6.3** Tripoint kan gazı cihazı dokunmatik ekranına basılır.

**6.4** Ekran menü gelir ve hasta testi modu seçilir.

**6.5** Ürün türü, lod numarası kartuş paketi üzerindeki bilgilerle eşleştirilir. İleri butonuna basılır.

**6.6** Kartuş yerleştirilir ve 1 dk cihaz kalibrasyonu beklenir.

**6.7** Cihaz sesli uyarı verir ve 4 dakika içinde kapak açılarak numune yerleştirilir.

**6.8** Cihazın tetekiki okuması beklenir.

**6.9** Cihaz sonucu otomatik olarak yazdırır. Sonuç alınınca tamamlandı butonuna basılır.

**6.10** Menüdeki çık butonuna basılır. Kartuş çıkarılarak tıbbi atığa atılır.

## 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM