

| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA /NO   |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| MC.TL.06     | 01.01.2019   | 0           | -               | Sayfa 1 / 1 |

## 1. AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak.

## 2. KAPSAM

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Doktor, hemşire, ebe hemşire, sağlık memurları

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1** Küvözün fişi prize takılır.

**6.2** Sağ yan taraftaki power "0" ,"1" yazan düğmeye basılarak açılır.

**6.3** Sağ yan tarafta "patient probe" yazan bölüme ısı probu takılır ve ucu bebeğin karın bölgesine yerleştirilir.

**6.4** Bebek haftası, kilosuna, vücut ısısına göre küvez ısı ayarlanır.

**6.5** Aynı yerde "Auxiliary Air Probe " yazan yerine hava probu takılarak küvöz içi nem oranına bakılır.

**6.6** Sıcaklık ayarlamak için sıcaklık ayar tuşu kullanılır.

**6.7** Nem ayar tuşu nem ayarı için kullanılır.

**6.8** Hava modu tuşuna bir sn boyunca basılı tutulur. Hava modu seçilir ve ekranda görünür.

**6.9** Cilt modu tuşuna bir sn boyunca basılı tutulur. Cilt modu seçilir ve ekranda görünür.

**6.10** Çıkış tuşu: devam etmekte olan işlemler sonlandırılır

## 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

| HAZIRLAYAN<br>BÖLÜM KALİTE<br>SORUMLUSU | KONTROL EDEN<br>KALİTE YÖNETİM<br>DİREKTÖRÜ | ONAYLAYAN<br>BAŞHEKİM |
|---|---|-----------------------|
|   |   |                       |