

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.07	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Hastanemizde mamografi cihazının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM

Radyoloji ünitesi

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Radyoloji teknisyenleri

6. UYGULAMA

6.1 Mamografi cihazı açma kapama düğmesinden açılır.

6.2 Hasta soyunma kabineye alınarak belden üst kısmına soyunması istenir.

6.3 Kaset makineye yerleştirilip yön işaretleri konulur.

6.4 Hastaya uygun pozisyon verilerek sıra ile A:P (ön - arka)sağ ve sol meme sonra oblik (60°) açı ile sağ ve sol meme çekimi yapılır.

6.5 Filmler banyo makinesine verilip kontrolleri yapıldıktan sonra hastaya giyinmesi talimatı verilir.

6.6 Çıkan filmler ad- soyad, tarih yazılıp poşetlenip radyoloji uzmanına gönderilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM