

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.12	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak

2. SORUMLULAR

Hekimler acil durumlarda hemşire, ebe hemşire ve sağlık memuru

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Ventilatör uygun tıbbi oksijen ve hava kaynağına bağlanır.

6.2 Ventilatör hastanede uygun elektrik çıkışına bağlanmalıdır.

6.3 Uygun hasta devresi ventilatöre bağlanmalıdır.

6.4 Hasta devresi uygun olan bir nemlendirme ünitesine bağlanır.

6.5 Sistem on/off butonuna basılmalıdır.

6.6 Millennium cihaz ilk açıldığında default modu standby, stby modları, tüm ventilatör ayarlarını ti,f,pıp,peep,sensitivity ve alarm ayarları doktor tarafından ayarlanır.

6.7 İşlem bitince ventilatörü kapatmak için system on/off düğmesi 2 saniye basılı tutulmalıdır. Cihaz fişten çekilerek oksijen ve hava girişi yerleri çıkarılır.

6.8 Kullanım sonrası uygun temizliği yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM