

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
TH.TL.08	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

**1. AMAÇ:** Hastane bünyesinde; Transfüzyon Merkezi'nde, acil durumlarda yapılan enfeksiyon tarama testlerinden HBs Ag testinin doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

**2. KAPSAM:** Transfüzyon merkezi ve laboratuvar birimini kapsar.

### 3. KISALTMALAR

### 4. TANIMLAR

**5. SORUMLULAR:** Transfüzyon Merkezi çalışanları, Laboratuvar birimi çalışanları.

### 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1** Kaset testi poşetinden çıkarınız ve kuru düz bir yüzeye koyunuz.

**6.2** Testi ve serum/plazma örneğini oda sıcaklığına getiriniz.

**6.3** Damlalığa serum/plazma örneğini çekiniz ve kasetin örnek gözüne hava kabarcığı olmayacak şekilde 3 damla

(100 µl) damlatınız.

**6.4 Değerlendirme:** 5 - 15 dk içinde test sonucunu değerlendiriniz. Sonuç penceresinde iki renkli bant (T ve C) pozitif sonucu, tek renkli bant (C) negatif sonucu göstermektedir.

**6.5 Çalışma Zamanı:** Mesai saatlerinde ve nöbetlerde çalışılacaktır.

### 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM