

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|--|
|  ÖZEL ORDU Sevgi HASTANESİ | ANTI-HCV KASET TEST ÇALIŞMA TALİMATI | | |  |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA /NO |
| TH.TL.10 | 01.01.2019 | 0 | - | Sayfa 1 / 1 |

1. AMAÇ: Hastane bünyesinde; Transfüzyon Merkezi'nde, acil durumlarda yapılan enfeksiyon tarama testlerinden anti-HCV testinin doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM : Transfüzyon merkezi ve laboratuvar birimini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi çalışanları, Laboratuvar teknisyenleri.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Kaset testi poşetinden çıkarınız ve kuru düz bir yüzeye koyunuz.

6.2 Testi ve serum/plazma örneğini oda sıcaklığına getiriniz.

6.3 Damlalığa serum/plazma örneğini çekiniz ve kasetin örnek gözüne hava kabarcığı olmayacak şekilde 4 damla (200 µl) damlatınız.

6.4 Değerlendirme: 10-20 dk içinde test sonucunu değerlendiriniz. Sonuç penceresinde iki renkli bant (T ve C) pozitif sonucu, tek renkli bant (C) negatif sonucu göstermektedir.

6.5 Çalışma Zamanı: Mesai saatlerinde ve nöbetlerde çalışılacaktır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

| | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BÖLÜM KALİTE | KALİTE YÖNETİM | BAŞHEKİM |
| SORUMLUSU | DİREKTÖRÜ | |