
 ÖZEL ORDU Sevgi HASTANESİ	ANTI-HIV KASET TEST ÇALIŞMA TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
TH.TL.11	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ: Hastanemiz bünyesinde; Transfüzyon Merkezi'nde, acil durumlarda yapılan enfeksiyon tarama testlerinden anti-HIV testinin doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM: Tranfüzyon merkezi ve laboratuvar'ı kapsar

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi çalışanları, Laboratuvar teknisyenleri.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 HIV 1 (Grup O dahil) ve HIV 2'nin tüm alt tiplerine karşı gelişen antikorları (Ig G, Ig M ve Ig A) kalitatif olarak saptayan immunokromatografik test yöntemidir.

6.2 İçindekiler:

- 50 kaset test
- 50 adet damlalık
- Kullanım kılavuzu

6.3 Depolama:

- +4-30 °C
- Kaset test poşetinden çıkarıldıktan sonra 1 saat içinde kullanılmalıdır.

6.4 Örnekler:

Serum/plazma örnekleri kullanılır. Bulanık ve hemolizli örnekler sonuçları etkileyebileceği için test edilmez.

6.5 Uygulama:

6.5.1 Kaset testi poşetinden çıkarınız ve kuru düz bir yüzeye koyunuz.

6.5.2 Testi ve serum/plazma örneğini oda sıcaklığına getiriniz.

6.5.3 Damlalığa serum/plazma örneğini çekiniz ve kasetin örnek gözüne hava kabarcığı olmayacak şekilde 2 damla

(50 µl) damlatınız.

6.5.4 Değerlendirme: 5-15 dk içinde test sonucunu değerlendiriniz. Sonuç penceresinde iki renkli bant (T ve C) pozitif sonucu, tek renkli bant (C) negatif sonucu göstermektedir.

6.5.5 Çalışma Zamanı: Mesai saatlerinde ve nöbetlerde çalışılacaktır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--	--	-------------------------------