
	SİFİLİZ KASET TEST ÇALIŞMA TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
TH.TL.13	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ: Hastane bünyesinde rutin çalışmada ve Transfüzyon Merkezi'nde acil durumlarda yapılan enfeksiyon tarama testlerinden sfiliz testinin doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Transfüzyon merkezi ve laboratuvar birimi

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR:Transfüzyon Merkezi çalışanları, Laboratuvar çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Kaset testi poşetinden çıkarınız ve kuru düz bir yüzeye koyunuz.

6.2. Testi ve serum/plazma örneğini oda sıcaklığına getiriniz.

6.3. Damlalığa serum/plazma örneğini çekiniz ve kasetin örnek gözüne hava kabarcığı olmayacak şekilde 3 damla (100 µl) damlatınız.

6.4. Değerlendirme: 5-15 dk içinde test sonucunu değerlendiriniz. Sonuç penceresinde iki renkli bant (T ve C) pozitif sonucu, tek renkli bant (C) negatif sonucu göstermektedir.

6.5. Çalışma Zamanı: Mesai saatlerinde ve nöbetlerde çalışılacaktır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--	--	-------------------------------------