

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
TH.TL.15	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ: Laboratuvarda kullanılan gizli kan testinin, günlük çalışmasının kurallarla düzenlenmesi.

2. KAPSAM: Laboratuvar teknisyenleri

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR: Laboratuvar ve tranfüzyon merkezi çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Uygun bir tüp içine 500 ml ID- DiLÜENT 2 ve 50 ul kan grubu çalışılacak hastanın tam kanı konur, resüspanse edilir.

6.2 Kan grubu kartının üzerine hasta adı yazılır.

6.3 Karttaki tüm mikro tüplere 12.5 ul eritrosit süspansiyonu pipetlenir .

6.4 ID- Santrifüzde 10 dakika santrifüj edilir.

6.5 Santrifüjden sonra değerlendirilir. Kan grubu kayıt defterine kayıt edilir.

6.6 Sonuç bilgisayara yazılıp teknik onay verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--	--	-------------------------------